



PRZEWODNIK PO SYSTEMIE FlexPoint®



UWAGA! Niniejsza broszura nie stanowi instrukcji obsługi. Jest to poradnik ułatwiający zapoznanie się z systemem FlexPoint®.

Wszelkie zasady bezpieczeństwa oraz korzystania z wyrobu znajdują się w oficjalnej instrukcji FlexPoint®.

© Sławomir Wroński 2019

1. Czym jest system FlexPoint®?

System FlexPoint® powstał w celu zapewnienia pełnej i bezpiecznej stabilizacji pacjenta. Cechą naszego systemu jest uniwersalność montażu. Bez trudu zamontujesz nasz wyrób w wózku inwalidzkim, foteliku rehabilitacyjnym i innych siedziskach.

Nasze wyroby podzielone są na dedykowane grupy do stabilizacji konkretnych partii ciała:



STABILIZACJA TUŁOWIA

W tej grupie znajdziemy kamizelki klasyczne, dynamiczne oraz pasy tułowia: 2-punktowe i 4-punktowe.



STABILIZACJA MIEDNICY

Do tej grupy należą pasy biodrowe: 2-punktowe i 4-punktowe w wersji klasycznej oraz dynamicznej.



STABILIZACJA KOŃCZYN DOLNYCH

Znajdziemy tu pasy odwodzące uda, pas łydkowy oraz dynamiczne stabilizatory kostek.



PASY TRANSPORTOWE - BELTICAR®

Pasy BeltiCar® służą do stabilizacji pacjenta w transporcie drogowym.

UWAGA! Stosowanie systemu BeltiCar® nie zwalnia użytkownika ze stosowania samochodowych pasów bezpieczeństwa!



PASY UNIWERSALNE I AKCESORIA

W tych grupach znajdziemy pasy uniwersalne, klamry i podkładki odciążające dedykowane do naszych wyrobów.

2. Główne zalety systemu FlexPoint®

Wyrób Medyczny Klasy I

Wyroby FlexPoint® należą do grupy Wyrobów Medycznych Klasy I oraz spełniają normy ISO 13485.

Gwarancja 24miesiące

Nasze wyroby są objęte gwarancją 24 miesięcy. Zapewniamy również serwis pogwarancyjny.

Uniwersalność

Dzięki uniwersalnym elementom montażowym, poszczególne części systemu mogą być z powodzeniem stosowane na różnych wózkach inwalidzkich lub innych siedziskach.

Dynamika wyrobu

Elementy odciążające pacjenta są miękkie, sprężyste i rozciągliwe. **Redukują napięcie mięśniowe i ograniczają ryzyko powstawania uciśnień i odleżyn.**

System Chwyć i Pociągnij™

Specjalny system stosowany w naszych kamizelkach i pasach biodrowych. Ergonomiczny uchwyt w kształcie litery D ułatwia użytkownikowi szybkie i wygodne dopasowanie wyrobu. System przeznaczony jest także dla osób z dysfunkcjami dłoni.

Łatwy w czyszczeniu

Wyroby FlexPoint® są **łatwe w czyszczeniu**. Należy je prać ręcznie. Szczegóły konserwacji zawarte są w instrukcji FlexPoint®.

Przyjazny dla skóry


Zastosowane materiały nie wywołują podrażnień i są bezpieczne dla użytkownika.

3. Jak montujemy system FlexPoint®?

Wybrane wyroby **FlexPoint®** (przedstawione w poniższej tabeli) standardowo wyposażone są w zakończenie z trójkątem montażowym oraz regulatorem (**FP-EM-2**). Elementy te umożliwiają montaż wyrobu i regulację długości paska.

Poniższa tabela przedstawia ilość trójkątów montażowych, w które wyposażony jest wyrób. W takiej samej ilości należy dokupić wybrany element montażowy (opis elementów montażowych w rozdziale 4 broszury).

Symbol	FP-EM-2
FP-01	4 sztuki
FP-02	4 sztuki
FP-03	4 sztuki
FP-04	2 sztuki
FP-05*	2 sztuki
FP-06	4 sztuki
FP-10	2 sztuki
FP-11	4 sztuki
FP-12	2 sztuki
FP-13	4 sztuki
FP-14	2 sztuki
FP-15	2 sztuki
FP-20	4 sztuki

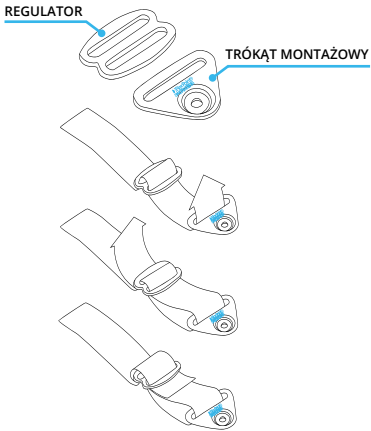


Sposób zakładania trójkąta montażowego oraz regulatora. Elementy te umożliwiają montaż wyrobu i regulację długości paska.

TRÓJKĄT MONTAŻOWY (FP-EM-2)

Standardowe wyposażenie większości wyrobów FlexPoint®.

Do trójkąta mocuje się wybrany element montażowy (rozdział 4 broszury).

*Wyrób FP-05 wyposażony jest również w klamrę, jeśli chcemy go zamontować do dowolnego oparcia.

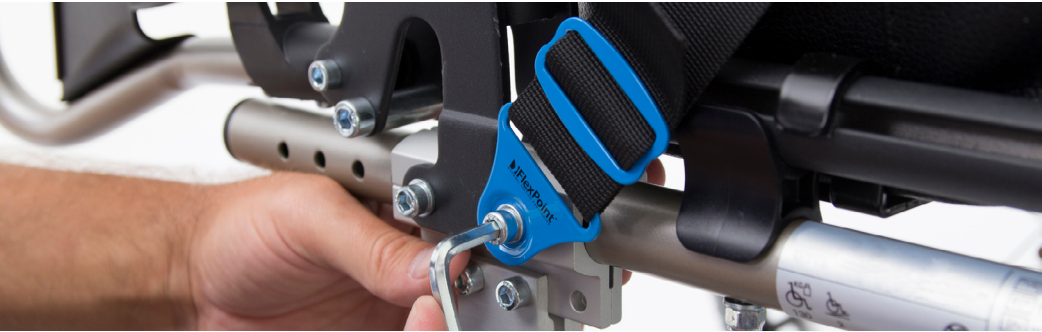

4. Jakich elementów montażowych potrzebuję?

W zależności od powierzchni, do której chcesz zamocować wyrób, będziesz potrzebować wybrane elementy montażowe w odpowiedniej ilości (tabelka powyżej). **Pełny opis sposobu montażu wyrobów FlexPoint® znajdziesz w instrukcji obsługi FlexPoint®.**

1. FP-EM-1		2. FP-EM-2		3. FP-EM-3	
4. FP-EM-4		5. FP-EM-5		6. FP-EM-6	

1

ZESTAW MONTAŻOWY

ref. FP-EM-2 ref. FP-EM-4

Do dużej, stabilnej powierzchni (np.oparcia wózka, siedziska)

(istniejący otwór nieprzelotowy, gwintowany w wózku / siedzisku):

Wyrób możesz zamocować za pomocą trójkąta montażowego oraz śruby **FP-EM-4**.

Wymagane narzędzia: Klucz imbusowy.

2

ZESTAW MONTAŻOWY

ref. FP-EM-2 ref. FP-EM-5

Istniejący otwór przelotowy

(istniejący otwór przelotowy w wózku / siedzisku):

Wyrób możesz zamocować za pomocą trójkąta montażowego oraz śruby **FP-EM-5**.

FP-EM-5 z drugiej strony zabezpiecza się za pomocą dołącznej nakrętki.

Wymagane narzędzia: Klucz imbusowy, klucz płaski.

3

ZESTAW MONTAŻOWY

ref. FP-EM-2 ref. FP-EM-6

Powierzchnia drewniana

(oparcie / siedzisko fotelika lub krzesła):

Wyrób możesz zamocować za pomocą trójkąta montażowego oraz **wkrętu do drewna FP-EM-6**. Element do którego mocujesz wyrób powinien mieć min. 18 mm grubości.

Wymagane narzędzia: Klucz krzyżakowy

4

ZESTAW MONTAŻOWY

ref. FP-EM-2 ref. FP-EM-3

Montaż „z napinaczem”

(montaż elementem FP-EM-3):

Szczegółowy opis znajduje się w instrukcji obsługi systemu FlexPoint®.

7

ZESTAW MONTAŻOWY

ref. FP-EM-2 ref. FP-EM-1

Montaż „nieinwazyjny”

(montaż na ramie wózka inwalidzkiego lub siedziska):

Wyrób możesz zamocować za pomocą trójkąta montażowego oraz **FP-EM-1**.

Element należy stosować na ramie wózka/siedziska o średnicy Ø25mm Jeżeli rama ma inną średnicę niż Ø25, możemy wówczas zastosować zaciski redukujące (Ø22 lub Ø19), które dołączone są do zestawu.

Wymagane narzędzia: Klucz imbusowy.

5. Rodzaje dociągów wyrobu

W wybranych wyrobach wyróżniamy dwa rodzaje dociągów:

- DOCIĄG PRZEDNI – dla użytkownika (SAMOOBSŁUGA)
- DOCIĄG TYLNI – dla opiekuna (ASYSTA)

Rodzaj dociągu określasz podczas składania zamówienia.



6. Uwagi do montażu



UWAGA! Przed rozpoczęciem użytkowania wyrobów FlexPoint® należy bezwzględnie zapoznać się z instrukcją obsługi dołączoną do wyrobu!

UWAGA! Do montażu wyrobów FlexPoint® zaleca się wykorzystanie ramy wózka/siedziska lub istniejących już otworów gwintowanych (w przypadku śruby FP-EM-5 otwór nie musi być gwintowany). Nie należy wykonywać samodzielnie otworów w wózku/siedzisku, gdyż może to naruszyć jego konstrukcję i spowodować zmniejszenie jego wytrzymałości! Należy pamiętać o tym, że samodzielne wykonywanie otworów w wózku/siedzisku rehabilitacyjnym może powodować utratę gwarancji na ten wyrób!

UWAGA! Wytwórca wyrobów FlexPoint® nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie wózka/siedziska rehabilitacyjnego będącego następstwem samodzielnego wykonania otworów w celu montażu pasów FlexPoint®.

UWAGA! Do montażu wyrobów FlexPoint® należy stosować TYLKO I WYŁĄCZNIE elementy montażowe dedykowane przez wytwórcę! Stosowanie innych elementów łącznych niezatwierdzonych przez wytwórcę może stanowić poważne niebezpieczeństwo dla użytkownika w trakcie korzystania z wyrobów FlexPoint®!

7. System BeltiCar®




System BeltiCar® jest rekomendowany do stosowania wraz z pasami bezpieczeństwa w środkach transportu prywatnego lub publicznego. Z powodzeniem może być stosowany w czasie podróży samochodem lub autobusem. Zapewnia stabilizację i utrzymanie poprawnej pozycji siedzącej. Przeznaczony jest nie tylko dla osób niepełnosprawnych, lecz również dla osób zdrowych, w tym dzieci.

System składa się z pojedynczych elementów w różnych rozmiarach i możliwościach regulacji. Poszczególne pasy montowane są do centralnego pasa mocującego, który stanowi podstawowy element każdej konfiguracji.

BeltiCar® może być stosowany przez osoby z niedowładami, po porażeniach, oraz z mniejszą kontrolą nad swoim ciałem. Więcej informacji na temat systemu przeczytasz w instrukcji obsługi oraz na stronie www.flex-point.pl.




Dostępne wyroby BeltiCar®:

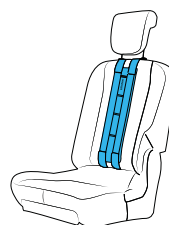


FP-40

Pas mocujący

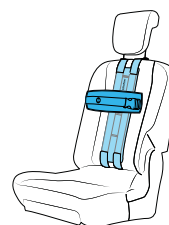


FP-41

Pas piersiowy

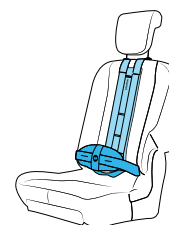


FP-42

Pas biodrowy

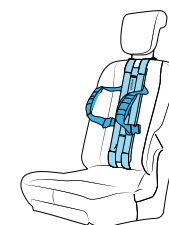

FP-43

Pasy naramienne

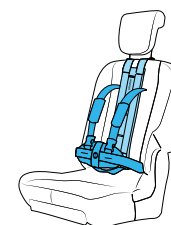

FP-44

Zestaw BeltiCar®



UWAGA! Stosowanie systemu BeltiCar® w pojazdach służących do przewozu osób, nie zwalnia użytkownika z obowiązku stosowania samochodowych pasów bezpieczeństwa.

OFICJALNY DYSTRYBUTOR



AKCES-MED SP. Z O.O.

Jasionka 955B, 36-002, Jasionka,
Polska

DANE KONTAKTOWE

Sprzedaż krajowa:
produkcja@akces-med.com
+48 17 864 04 73
+48 17 864 04 70

Export department:
export@akces-med.com
+48 17 864 04 77
+48 17 508 382 502

Отдел продаж:
joanna@akces-med.com
+48 17 864 04 75
www.akces-med.com

WYTWÓRCA



REH4MAT Sławomir Wroński

36-060 Głogów Małopolski, ul. Piaski 47, POLSKA

ADRES KORESPONDENCYJNY

Fabryka Wyrobów Ortopedycznych
ul.Truskawkowa 17, Widna Góra, 37-500 Jarosław, POLSKA
tel. : +48 16 621 42 20, 16 621 41 35
fax: +48 16 621 42 13
e-mail: biuro@reh4mat.com | export@reh4mat.com
www.flex-point.pl